

歯科医療機関専売品

トクヤマ **マルチシャイン** は
お子さまにも使いやすい
「優しい香り」
を採用しています。



トクヤマ マルチシャインの特長

「マルチシャイン」は、義歯、矯正用リテーナー、マウスガードなどマルチにご使用いただける洗浄剤です。

洗浄効果を高める、きめ細かな泡立ち

きめ細かな泡立ちで、洗浄力を強化。



パッケージは表裏2種類のデザインを採用。クリニックの患者層に合わせてディスプレイいただけます。

汚れを素早く、しっかり洗浄

浸漬時間5分でしっかり洗浄。

就寝中のつけおき洗浄も可能で、生活スタイルに合わせて洗浄時間が選べます。

※全ての菌を除菌できるわけではありません



義歯患者向け



食事を邪魔しない控えめな香りづけ

洗浄直後でも食事の邪魔をしない控えめな香りを採用。



矯正用リテーナー、
マウスガード患者向け

使用方法

1



150~200mL程度の水に1錠入れてください。

ぬるま湯(40℃程度)がより効果的です。

2



マウスガード、リテーナー等にも使える!

すぐに入れ歯全体を浸してください。

洗浄時間は5分程度です。

1晩程度であれば漬け置きも可能です。

ひどい汚れは浸漬後にスポンジなどで軽くこするとより効果的です。

3



洗浄後は水でよくすすいでください。

残った洗浄液は捨ててください。



ホームページに院内で
ご使用いただける
ポスターをご用意しています。

(A4サイズ × 6 種)

ダウンロードはこちらから ▶

